

# Instrucciones de limpieza y desinfección: Para su uso en los sistemas de TC, TEP/TC, SPECT y SPECT/TC de GE Healthcare

## Introducción



La limpieza y desinfección es fundamental para el mantenimiento del sistema de adquisición de imágenes. Antes de desinfectar el dispositivo, asegúrese de que está visiblemente limpio, ya que los residuos de materiales orgánicos o inorgánicos pueden afectar al proceso de desinfección.

Estas instrucciones de uso incluyen las instrucciones generales de limpieza y desinfección para los sistemas de adquisición de imágenes de GE Healthcare, así como las instrucciones detalladas para Velcro y correas, muñequeras, camilla y mesa, paneles y botones de control del gantry y accesorios. En función del dispositivo o la configuración, es posible que no se apliquen algunas instrucciones detalladas.

Estas instrucciones de uso son para productos de limpieza y desinfección aprobados para su producto.

Debido al tamaño de los dispositivos y a su inmovilidad, no se puede realizar una limpieza ni una desinfección automatizadas. Los usuarios deben realizar la limpieza de forma manual.

Consulte las instrucciones del usuario o la matriz del fabricante del producto que se suministra con el sistema para obtener información sobre el fabricante del mismo.

Productos de limpieza y desinfección	
	<p>Compruebe el tiempo de contacto/en húmedo respectivo de los productos de desinfección. Asegúrese de que el dispositivo permanece completamente húmedo durante todo el tiempo de contacto/en húmedo.</p>
	<p>Si un producto requiere aclarado, utilice un paño que no deje pelusa y PURW (agua purificada, estéril, pH neutro) para limpiar la pieza después de finalizar el proceso de limpieza y desinfección. Asegúrese de que se ha cumplido el tiempo de contacto/en húmedo antes de enjuagar.</p>

**Productos de limpieza y desinfección líquidos o en aerosol**

Si utiliza un limpiador o desinfectante líquido o en aerosol, dispense una cantidad en un paño limpio que no deje pelusa para usarlo como toallita. Asegúrese de que dispone de varios paños antes de comenzar el proceso de limpieza y desinfección.

No pulverice productos de limpieza ni desinfectantes directamente sobre el sistema. Si se pulveriza directamente sobre el sistema, se pueden dañar las piezas.



Este documento es una guía de referencia para la limpieza y desinfección de un sistema de adquisición de imágenes y se puede utilizar para formar al personal de limpieza. Consulte el Manual del usuario del sistema para obtener instrucciones detalladas sobre limpieza y seguridad.


## Instrucciones generales de limpieza

A continuación se describen las instrucciones generales de limpieza del sistema. Consulte las secciones específicas para obtener información sobre los procedimientos detallados de limpieza de los accesorios y del Velcro®.

### Limpieza: Eliminar la suciedad




Póngase guantes nuevos.

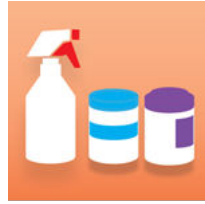


Reúna los productos aprobados.




Si utiliza un aerosol, pulverice una cantidad sobre un paño limpio que no deje pelusa para usarlo como toallita.

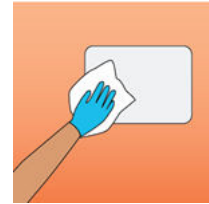

Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.

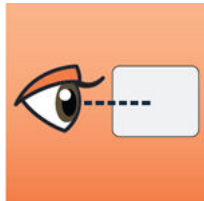

Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

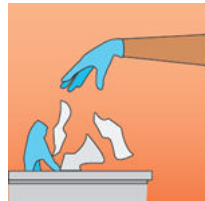


Deseche las toallitas y los guantes usados.

### Consideraciones especiales: Ranuras, huecos y botones



Envuelva un hisopo o una tarjeta de plástico con una toallita.

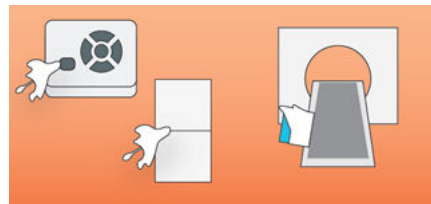

Coloque el borde o la punta en cualquier borde, hueco o ranura, y arrastre suavemente la toallita envuelta. Utilice tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpio.


## Instrucciones generales de desinfección

A continuación se describen las instrucciones de desinfección generales del sistema. Asegúrese de que el dispositivo esté visiblemente limpio antes de desinfectarlo. Consulte las secciones específicas para obtener información sobre los procedimientos detallados de limpieza de los accesorios y del Velcro®.

### Desinfección: Eliminar los gérmenes



Póngase guantes nuevos.

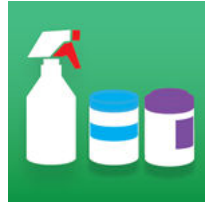

Reúna los productos aprobados.




Si utiliza un aerosol, pulverice una cantidad sobre un paño limpio que no deje pelusa para usarlo como toallita.



Limpe todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario.



Utilice toallitas nuevas para humedecer la pieza por completo.

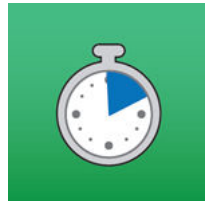


Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.




Deseche las toallitas y los guantes usados.

### Consideraciones especiales: Ranuras, huecos y botones

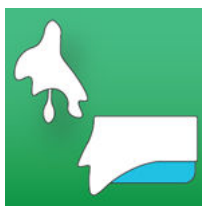

Envuelva un hisopo o una tarjeta de plástico con una toallita.

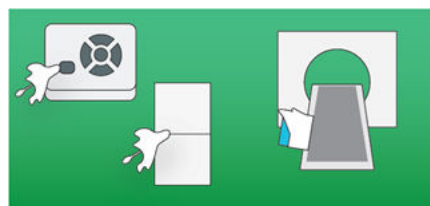

Coloque el borde o la punta en cualquier borde, hueco o ranura, y arrastre suavemente la toallita envuelta. Utilice toallitas nuevas siempre.

# Limpieza y desinfección de los paneles y botones de control del gantry

## Limpieza: Eliminar la suciedad



Póngase guantes nuevos.




Reúna los productos aprobados.




Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.




Envuelva un hisopo o una tarjeta de plástico con una toallita.

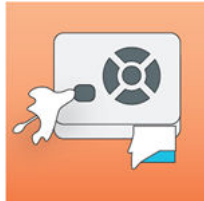

Coloque el borde en las ranuras o los huecos y arrastre suavemente, según sea necesario.

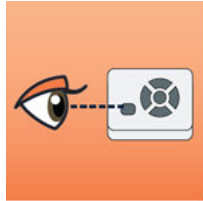

Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

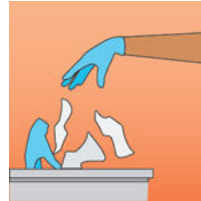

Deseche las toallitas y los guantes usados.


## Desinfección: Eliminar los gérmenes




Póngase guantes nuevos.



Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario.

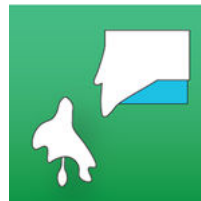


Envuelva un hisopo o una tarjeta de plástico con una toallita.

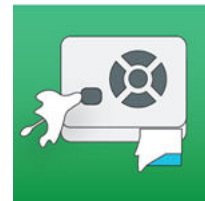

Coloque el borde en las ranuras o los huecos y arrastre suavemente, según sea necesario.



Utilice toallitas nuevas para humedecer la pieza por completo.

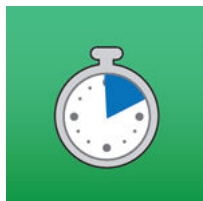

Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.



Deseche las toallitas y los guantes usados.

# Limpieza y desinfección de la camilla y la mesa

## Limpieza: Eliminar la suciedad



Póngase guantes nuevos.




Reúna los productos aprobados.




Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.




Para las ranuras, los huecos y los botones: Envuelva una tarjeta de plástico con una toallita.

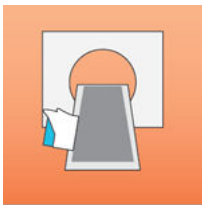

Coloque el borde en las ranuras o los huecos y arrastre suavemente, según sea necesario.

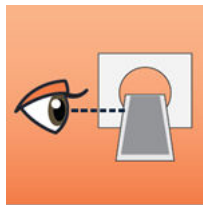

Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

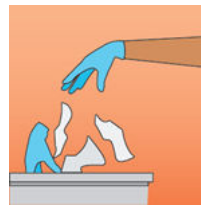


Deseche las toallitas y los guantes usados.


## Desinfección: Eliminar los gérmenes




Póngase guantes nuevos.

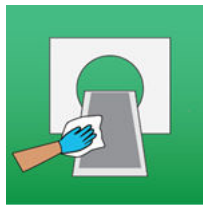


Limpe todos los lados de la mesa con tantas toallitas nuevas como sea necesario.

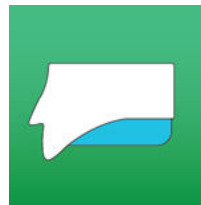


Para las ranuras, los huecos y los botones: Envuelva una tarjeta de plástico con una toallita.

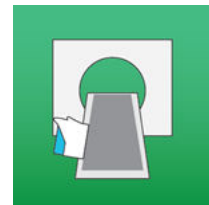

Limpe la mesa con toallitas nuevas para humedecerla por completo.

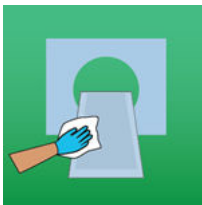

Utilice toallitas nuevas para humedecer la mesa por completo.

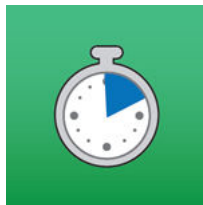

Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.



Deseche las toallitas y los guantes usados.

# Limpeza y desinfección de accesorios


## Limpeza: Eliminar la suciedad




Póngase guantes nuevos.




Reúna los productos aprobados.

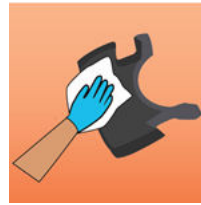

Limpe todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.

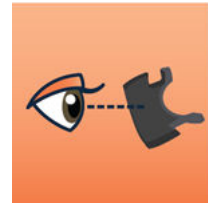

Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

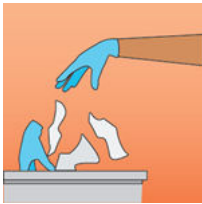

Deseche las toallitas y los guantes usados.


## Desinfección: Eliminar los gérmenes




Póngase guantes nuevos.



Limpe todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario.

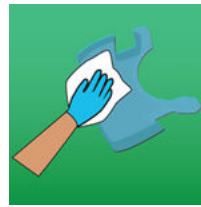

Utilice toallitas nuevas para humedecer la pieza por completo.

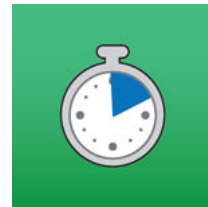

Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.




Deseche las toallitas y los guantes usados.

# Limpieza y desinfección de Velcro® y las correas


## Limpieza: Eliminar la suciedad




Póngase guantes nuevos.

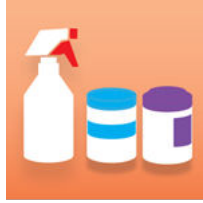


Reúna los productos aprobados.

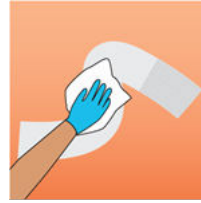

Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.

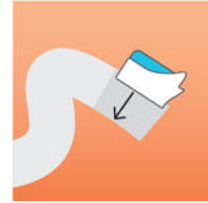


Envuelva la tarjeta con una toallita, presione el borde de la tarjeta en el Velcro® y empujela.

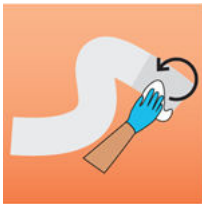


Con una toallita bien doblada, frote el Velcro® con un movimiento circular.



Enjuague las correas y el Velcro® con agua purificada (PURW).

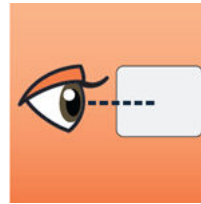

Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

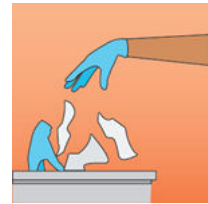

Deseche las toallitas y los guantes usados.


## Desinfección: Eliminar los gérmenes




Póngase guantes nuevos.




Limpie todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario.

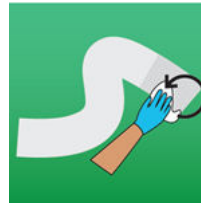

Con una toallita bien doblada, frote el Velcro® con un movimiento circular.

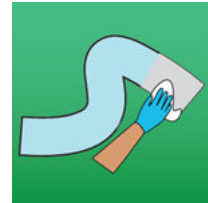

Limpie la correa con toallitas nuevas para humedecerla por completo.

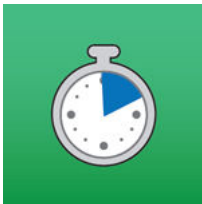

Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.



Deseche las toallitas y los guantes usados.



# Limpeza y desinfección de las muñequeras


## Limpeza: Eliminar la suciedad




Póngase guantes nuevos.



Reúna los productos aprobados.

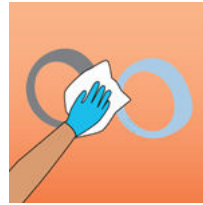


Limpe todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario hasta que quede limpia.

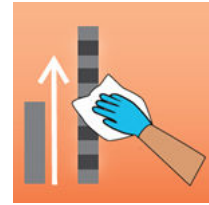


Abra todos los eslabones y compruebe que los huecos queden visiblemente limpios.



Frote los dientes o el cierre de la muñequera.

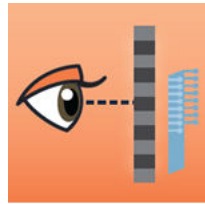


Asegúrese de que el dispositivo está visiblemente limpio.

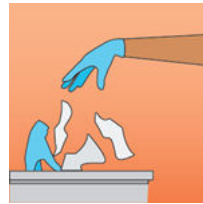


Deseche las toallitas y los guantes usados.

## Desinfección: Eliminar los gérmenes

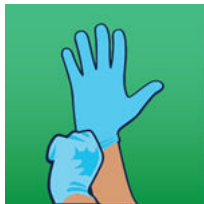


Póngase guantes nuevos.

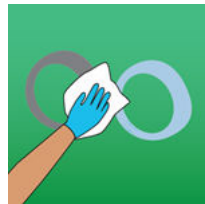


Limpe todos los lados de la pieza con tantas toallitas nuevas como sea necesario.



Abra todos los eslabones y compruebe que los huecos queden visiblemente húmedos.

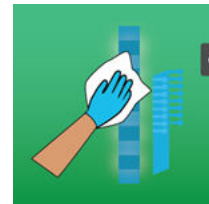

Limpe la muñequera con toallitas nuevas para humedecerla por completo.

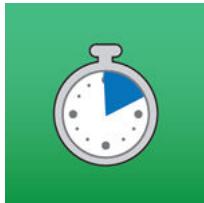

Asegúrese de que el dispositivo permanece húmedo durante el tiempo en húmedo del producto que corresponda.



Deseche las toallitas y los guantes usados.

## Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Motivo del cambio
1	Octubre de 2021	Versión inicial
2	Mayo de 2022	Actualizar

